


OnSite COVID-19 Ag Rapid Test

OnSite COVID-19 Ag Rapid Test er en lateral flowanalyse som påviser tilstedeværelsen av antigener fra SARS-CoV-2-virus innen de første sju dagene fra symptomene oppstår.

OnSite COVID-19 Ag Rapid Test kan brukes med både nasale og nasofaryngeale vattpinneprøver.

OnSite COVID-19 Ag Test er enkel å bruke, og kan utføres der pasienten befinner seg.

- **For nasale eller nasofaryngeale vattpinneprøver**
- **Resultater etter kun 15 minutter.**
- **Enkel å bruke: Personell kan utføre testen etter minimal opplæring**
- **94,7 % sensitivitet, 100 % spesifisitet**

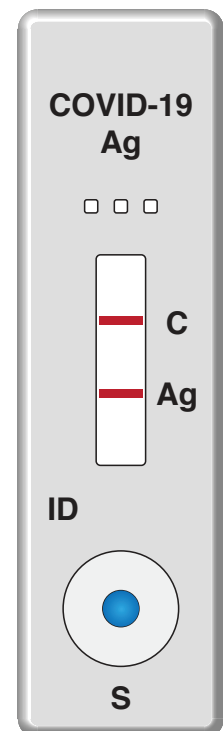


Hurtigveiledning - neseprøve


Følg trinnene når du tar nasale vattpinneprøver med OnSite COVID-19 Ag Rapid Test




Fjern forseglingen fra ekstraksjonsrøret. Kast forseglingen i en søppelpose. Behold søppelpose som du trenger senere.

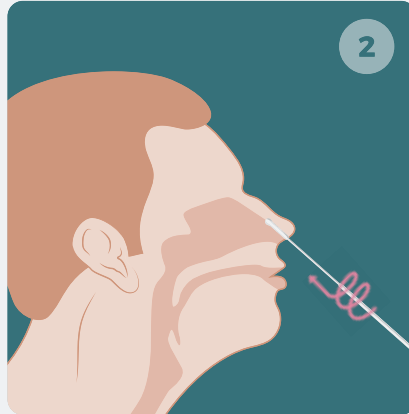


Sett inn vattpinnen 2-3 cm inn i hvert nesebor. Roter den flere ganger mot neseveggen. Gjenta i andre neseboret.

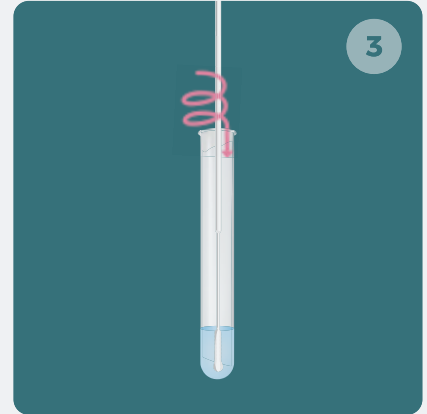


Legg vattpinnen inn i ekstraksjonsrøret. Vri det minst 5 ganger.

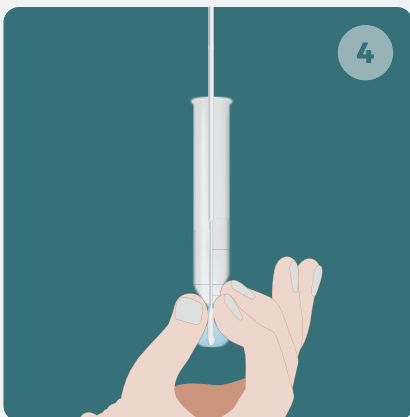

Klem tuben mot vattpinnen flere ganger.

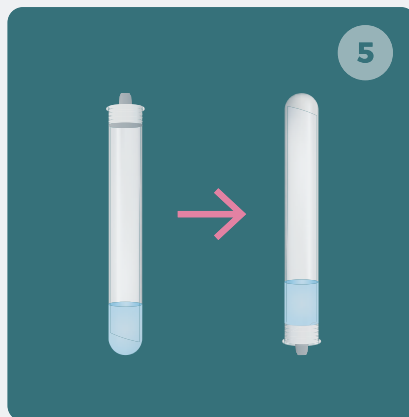


Fjern vattpinnen. Fest munnstykket og vri tuben opp ned.

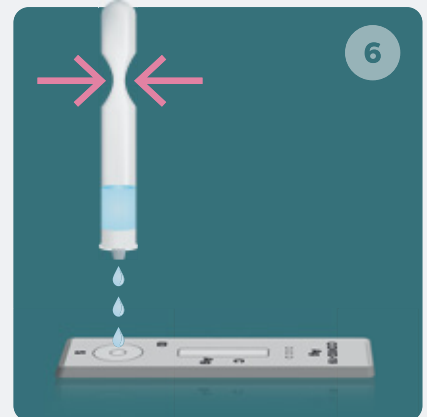


Hold tuben vertikalt og tilsett 3 dråper inn i prøvebrønnen.



Vent 15 minutter.

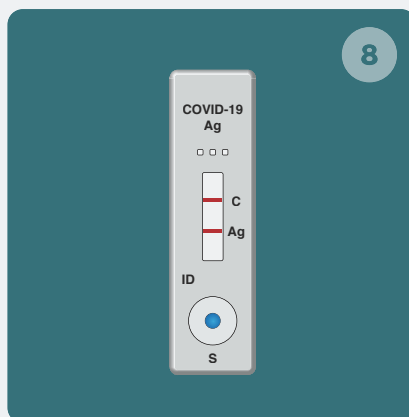

Se resultatet.

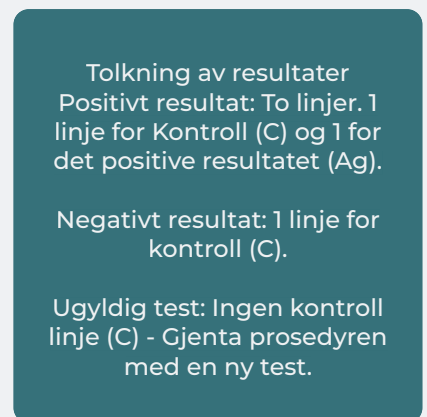

Tolkning av resultater
Positivt resultat: To linjer. 1 linje for Kontroll (C) og 1 for det positive resultatet (Ag).

Negativt resultat: 1 linje for kontroll (C).

Ugyldig test: Ingen kontroll linje (C) - Gjenta prosedyren med en ny test.

Se instruksjonsvideoen her: info.ssidiagnostica.dk/norway


Se bruksanvisningen for detaljert beskrivelse av testen, inkludert tolkning av resultatet.

Hurtigveiledning - nasofaryngeale prøve


Følg trinnene når du tar nasofaryngeale vattpinneprøver med *OnSite COVID-19 Ag Rapid Test*




1 Fjern forseglingen fra ekstraksjonsrøret. Kast forseglingen i en søppelpose. Behold søppelpose som du trenger senere.

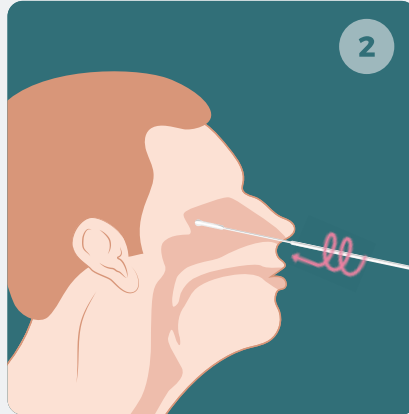


2 Sett vattpinnen i neseboret med mest sekresjon. Hold vattpinnen nær bunnen av nesekilleveggen og skyv den forsiktig inn i neselghulen. Snu vattpinnen flere ganger og trekk den deretter ut.

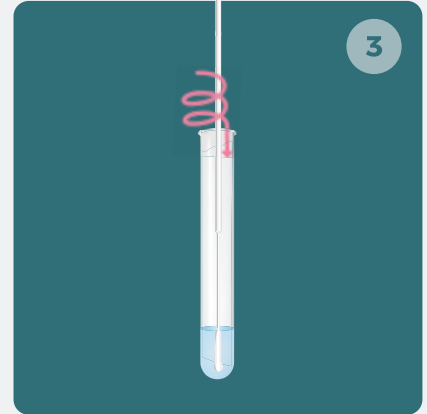


3 Legg vattpinnen inn i ekstraksjonsrøret. Vri det minst 5 ganger.

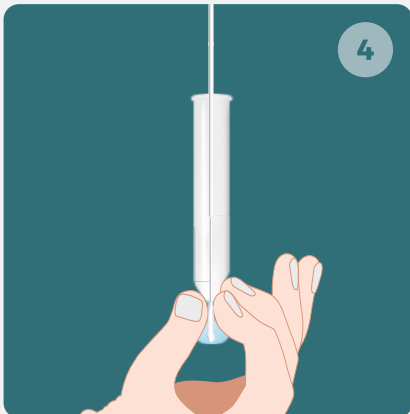

4 Klem tuben mot vattpinnen flere ganger.

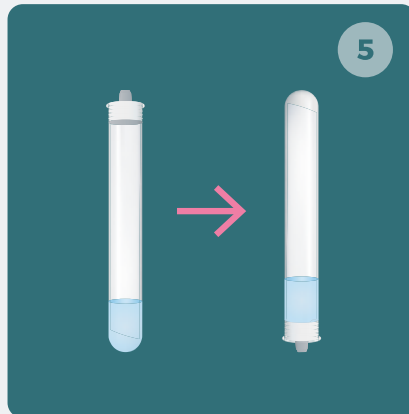


5 Fjern vattpinnen. Fest munnstykket og vri tuben opp ned.

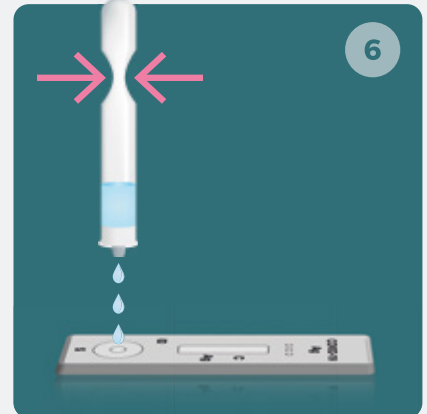


6 Hold tuben vertikalt og tilsett 3 dråper inn i prøvebrønnen.



7 Vent 15 minutter.

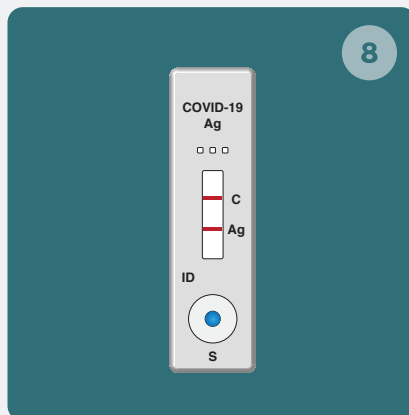

8 Se resultatet.

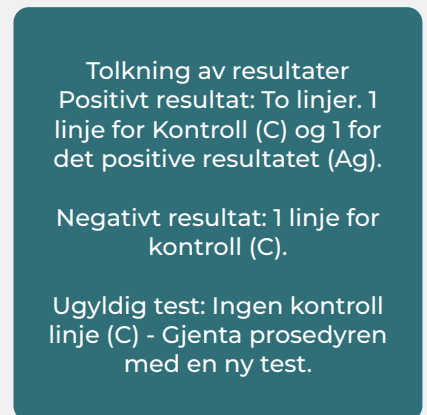

Tolkning av resultater
Positivt resultat: To linjer. 1 linje for Kontroll (C) og 1 for det positive resultatet (Ag).

Negativt resultat: 1 linje for kontroll (C).

Ugyldig test: Ingen kontroll linje (C) - Gjenta prosedyren med en ny test.

Se instruksjonsvideoen her: info.ssidiagnostica.dk/norway

Se bruksanvisningen for detaljert beskrivelse av testen, inkludert tolkning av resultatet.