



GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA TERAPIA DEL SUEÑO DE APRIA

Para el DreamStation® 2 de Philips Respironics



Utilice este enlace QR para ingresar a nuestra página sobre la apnea del sueño y así obtener más información.



INICIO.

Consulte su *guía de usuario para la terapia del sueño de Apria* para obtener más información.

1

Conecte el cable de alimentación a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



4

Vuelva a conectar el tanque de agua a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



2

Retire el tanque de agua de la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



5

Conecte el tubo a la máquina de PAP.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



3

Retire la tapa y llene el tanque con agua.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



6

Presione el botón de terapia para comenzar.

Consulte la página 4 de la Guía del usuario



CONTINÚA AL REVERSO

7

Ajuste su mascarilla. Si su médico le recetó una mascarilla y tamaño específicos, siga las instrucciones de ajuste proporcionadas por el fabricante. Si recibió una mascarilla con varias almohadillas, siga estas instrucciones:

Ya hay una almohadilla fijada a la estructura de su mascarilla. Este tamaño se adapta a la mayoría de los pacientes. Una vez que comience su terapia, si su mascarilla tiene una fuga o se siente incómoda, intente retirando la almohadilla actual y reemplazándola con una de otro tamaño. Si su medida se encuentra entre dos tamaños, es mejor utilizar la almohadilla más grande. Utilice la plantilla de ajuste (para la mascarilla nasal y la que cubre todo el rostro) o lea las instrucciones del fabricante que se incluyen con su mascarilla para obtener ayuda.

Consulte las páginas 5–8 de la Guía del usuario



Mascarilla Nasal

Mascarilla de Almohadilla Nasal

Mascarilla de rostro completo

8

Póngase la mascarilla.

Consulte las páginas 5–8 de la Guía del usuario

9

Conecte el tubo a la máquina de PAP.

Consulte las páginas 9–10 de la Guía del usuario

10

Conecte el tubo a su mascarilla.

(Si utiliza oxígeno recetado, consulte las páginas 9 y 10 de su *GUÍA DE USUARIO PARA LA TERAPIA DEL SUEÑO DE APRIA*).

Consulte la página 9 de la Guía del usuario



Tubo de alambre térmico conectado al dispositivo

Válvula de presión

Adaptador T para el oxígeno

Manguera de la mascarilla

11

Acuéstese y respire profundamente cuatro veces.

La máquina debe encenderse automáticamente. Si no oye que la máquina se enciende, presione el botón de **terapia** en la parte superior de la máquina. Relájese y comience a respirar lentamente por la nariz.

Consulte la página 11 de la Guía del usuario

12

Revise que no haya fugas de aire.

Fugas pequeñas son aceptables. Si ocurren fugas grandes, consulte su *GUÍA DE USUARIO DE LA TERAPIA DE SUEÑO DE APRIA*.

Consulte las páginas 11–12 de la Guía del usuario

13

Ha terminado la instalación.

¡Ahora está listo para comenzar su terapia de PAP!

Consulte la página 13 de la Guía del usuario

14

Asegúrese de seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento que se incluyen y revise el cronograma recomendado de reposición de suministros.

Consulte las páginas 14–20 de la Guía del usuario

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar su dispositivo y comenzar con la terapia, llame a un miembro del equipo de expertos en sueño de Apria.

Marque el número que aparece a continuación y seleccione la opción 4.

877.265.2426

Lunes a viernes: de 8 a.m. — 10 p.m., hora estándar del este

Sábados y domingos: de 11a.m. — 7:30 p.m., hora estándar del este

