

# Guía de inicio rápido sobre la terapia del sueño de Apria

para el 3B™ Medical Luna® G3 BPAP y CPAP




## INICIO.

Consulte su **Guía del usuario sobre la terapia del sueño de Apria** para obtener más información.

1

Coloque el dispositivo en una superficie firme y plana.


Consulte la página 5 de la Guía del usuario.

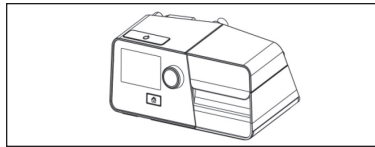

2

Conecte el cable de alimentación: Inserte el enchufe del adaptador de corriente en la entrada de corriente continua (DC) en la parte posterior del dispositivo. Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en la toma de corriente.

**NOTA:** Si tiene un dispositivo BPAP, consulte la página 5 de la Guía del usuario para conectar la caja del cable de alimentación.

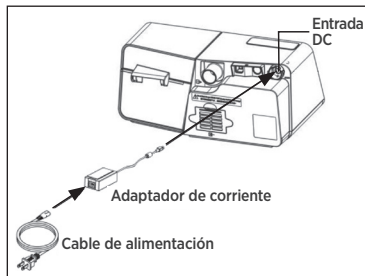


3

Conecte el extremo del tubo a la salida de aire del dispositivo. Si usa un tubo térmico, conecte la junta del tubo térmico a la salida de aire del dispositivo y luego inserte el enchufe de alimentación en el puerto del tubo térmico en la parte posterior del dispositivo.

Conecte el otro extremo del tubo a la máscara de acuerdo con el manual de usuario de la máscara.


Consulte la página 6 de la Guía del usuario.

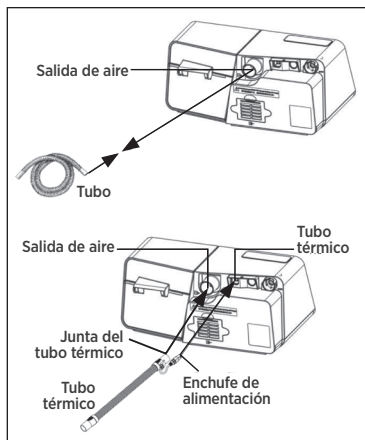

4

Presione hacia abajo la cámara de agua y luego retírela. Abra la tapa de la cámara de agua y llénela con aproximadamente 360 ml de agua.


Consulte la página 6 de la Guía del usuario.

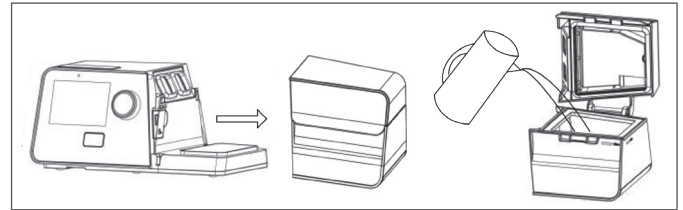

5

Cierre la tapa después de llenar la cámara con agua y vuelva a colocarla en el dispositivo.


Consulte la página 7 de la Guía del usuario.

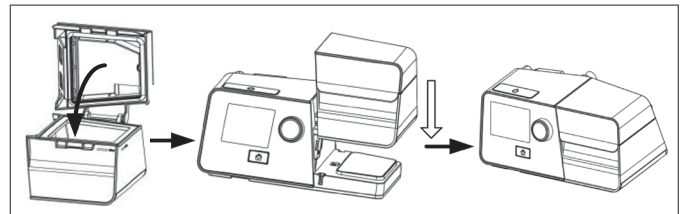


6

Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.

Consulte la página 7 de la Guía del usuario.

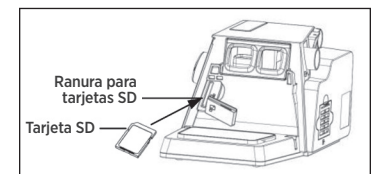

7

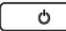Conecte el dispositivo a una toma de corriente, presione el botón de Inicio/Parada  y el dispositivo comenzará a suministrar aire.

Consulte la página 7 de la Guía del usuario.

8

**Ajuste su máscara. Si el médico le recetó una máscara y talla específicas, siga las instrucciones de ajuste proporcionadas por el fabricante. Si ha recibido una mascarilla con varias almohadillas, siga las instrucciones a continuación:**

En este momento hay una almohadilla fijada a la estructura de la máscara. Este tamaño se ajusta a la mayoría de los pacientes. Una vez que comience la terapia, si la máscara gotea o resulta incómoda, intente retirar la almohadilla existente y sustituirla por otra de diferente tamaño. Si su talla es intermedia, es mejor utilizar la almohadilla más grande. Para obtener ayuda, utilice la plantilla de ajuste (para la máscara nasal y la máscara facial completa) o consulte las instrucciones del fabricante que se incluyen con la máscara.

**Consulte la Guía del usuario en las páginas de la 8 a la 11.**



Máscara nasal



Máscara nasal con almohadillas



Máscara facial completa

9

**Colóquese la máscara.**

**Consulte la Guía del usuario en las páginas de la 8 a la 11.**

10

**Conecte el tubo al equipo de PAP.**


**Consulte la Guía del usuario en la página 12.**

11

**Conecte el tubo a la máscara.**

(Si utiliza oxígeno recetado, consulte la página 10 de su **Guía del usuario sobre la terapia del sueño de Apria**).

**Consulte la Guía del usuario en las páginas de la 12 a la 14.**

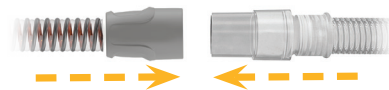

12

**Acuéstese y respire profundamente cuatro veces.**

La máquina debería encenderse automáticamente. Si se percata de que el equipo no arranca, pulse el botón "Start Therapy/Standby" (Iniciar terapia/Pausa). Relájese y comience a respirar lentamente por la nariz.

**Consulte la Guía del usuario en la página 14.**

13

**Compruebe si existen fugas de aire.**

Las fugas pequeñas son normales, pero si se producen fugas grandes, consulte la **Guía del usuario sobre la terapia del sueño de Apria**.

**Consulte la Guía del usuario en las páginas de la 14 a la 15.**

14

**La instalación está completa. ¡Ya está listo para comenzar su terapia de PAP!**

**Consulte la Guía del usuario en la página 16.**

15

**Asegúrese de seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento proporcionadas, igualmente revise el calendario de sustitución de suministros recomendado.**

**Consulte la Guía del usuario en las páginas de la 19 a la 20.**

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar su dispositivo y empezar a utilizarlo, llame a un miembro del Equipo de Expertos en Sueño de Apria.

Marque el número indicado a continuación y seleccione la opción 4.

877.265.2426

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 10 p. m., hora del este  
Sábado, de 11 a. m. a 7:30 p. m., hora del este

